

Istruzioni per l'uso

**Prepararsi al prelievo
del campione di DNA**

**Come prelevare il
campione di saliva**

**Attivazione e spedizione
del vostro campione**



Velocità



Risultati accurati



Riservato



Affidabile

Passo 1 - Preparazione al prelievo di campione di DNA

Controllare di avere tutti i componenti per il test del DNA prima di iniziare



1 imbuto



Codice a barre col numero del test


1 provetta



1 confezione per il trasporto




Busta dove inserire il campione

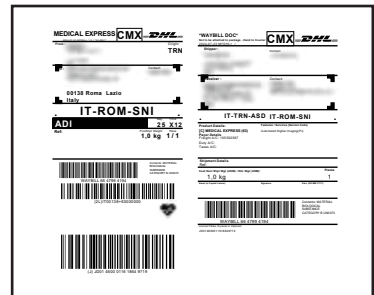

Confezione per restituzione al laboratorio

Prima di iniziare, leggere le avvertenze e le istruzioni per la raccolta del campione di saliva nella provetta

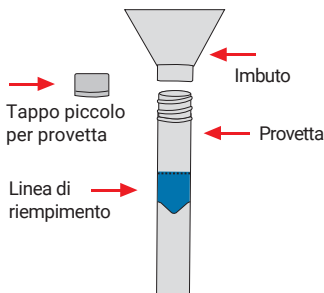

Uso previsto: solo per la raccolta di DNA umano da campioni di saliva.


Contenuto: la provetta contiene liquido stabilizzante.

Avvertenze e precauzioni: lavare con acqua se il liquido stabilizzante entra in contatto con gli occhi o la pelle. **NON** ingerire. Il tappo piccolo può rappresentare un rischio di soffocamento.


Conservazione: 15°C \ 30°C

Passo 2 - Come prelevare il campione di DNA e riempire la provetta

Leggi tutte le istruzioni prima di riempire la provetta di raccolta

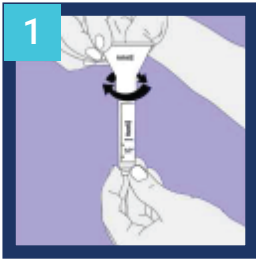

- Rimuovi l'imbuto di raccolta e la provetta dalla confezione.

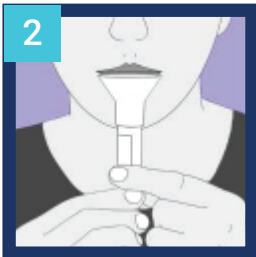

- Sputa nell'imbuto finché il livello del liquido nella provetta, escluse le bolle, non raggiunge la linea dei 2 ml.
- L'erogazione della saliva richiederà tra 2 e 5 minuti.



- Svita l'imbuto di raccolta e rimetti saldamente il tappo della provetta.
- Smaltisci l'imbuto.



- Agita più volte la provetta di raccolta per mescolare la saliva con la soluzione.
- **CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE DOPO LA RACCOLTA**

Passo 3 - Attivare il test e inviare il campione di DNA

3A - Accedere al proprio account e selezionare il test per attivarlo

1 Attivare il mio test

Seleziona attiva il mio test

2 Attivare il test

Selezionare attiva

#	Nome	Data di nascita	Test ordinato	Azione
1	Avanti Maria	17-12-2000	Alerges	Attivare il test

3B - Attivare il test online

Attivare il test

Nome del paziente: Avanti Maria Data di nascita: 17-12-2000

Sexo: FEMILE

Nome del test: Alerges

Change patient

Per attivare il test, confermare l'ora e la data in cui è stato effettuato il test, compilare il lato anteriore della scheda di richiesta del test del DNA e spedire i campioni del test.

Data del test: 00/00/0000 Tempo di prova: 00:00

Numero di codice a barre del test

Se non inserisci il numero di codice a barre del test, non saremo in grado di tracciarlo

Avete compilato la scheda di richiesta delle analisi del DNA.

Avete confezionato correttamente il campione di sangue e lo invierete il giorno stesso.

Attivare il test

3C - Infine, spedire il campione nell'imballaggio di trasporto e nella busta di ritorno

Inserire il campione di DNA nella confezione di trasporto

Esempio di busta per la consegna del campione

Inserire la confezione di trasporto nell'imballaggio da restituire al laboratorio